

## POUŽITÍ

Návod k použití: Původní vložky do bot lze pravděpodobně vyndat - udělejte to jako první. Dejte vložku do boty a vyzkoušejte její velikost. Je-li to nutné, zastříhněte vložku podél čáry (ve spodní části vložky v blízkosti prstů), která odpovídá vaší velikosti boty. Jako vzor můžete také použít původní vložky do bot. Vložte vložku do bot Scholl GelActiv® gelovou stranou dolů. Vyměňte po šesti (6) měsících používání, nebo pokud vykazují známky opotřebení. Vhodné pro velikost obuvi:

Dámské: A - 35,5; B - 37; C - 38; D - 39,5; Plná velikost - 40,5.

Pánské: A - 40; B - 41,5; C - 42,5; D - 44; E - 45; Plná velikost - 46,5.

Zastříhněte podle potřeby. Viz pokyny umístěné uvnitř.

Pokyny pro čištění: Pokud chcete vložky vyčistit, stačí je otřít hadříkem namočeným v teplé mýdlové vodě (nenamáčejte).